



模擬難聴システムWHIS for Windows 10 セットアップマニュアル  
Setup manual of Wadai Hearing Impairment Simulator for Windows 10  
<http://www.cs.tut.ac.jp/~tmatsui/whis/index.html>

February 7, 2020, WHIS v225  
Wakayama University,  
入野俊夫 Toshio IRINO, D. Eng.  
Toyohashi University of Technology  
古屋孝基 Koki FURUYA  
松井淑恵 Toshie MATSUI, PhD.

1. MyAppInstaller\_mcr.exeをダブルクリックして起動します。
1. Double-click “MyAppInstaller\_mcr.exe” to start it.

<input type="checkbox"/> 名前	更新日時	種類	サイズ
 MyAppInstaller_mcr.exe	2020/02/07 6:57	アプリケーション	985,363 KB

2. [次へ]を選択します。
2. Select [Next].




3. インストールフォルダを選択します。

こだわりがなければそのまま[次へ]ボタンを押してください。


3. Select the installation folder.

If you do not have a particular installation folder, just click the [Next] button.

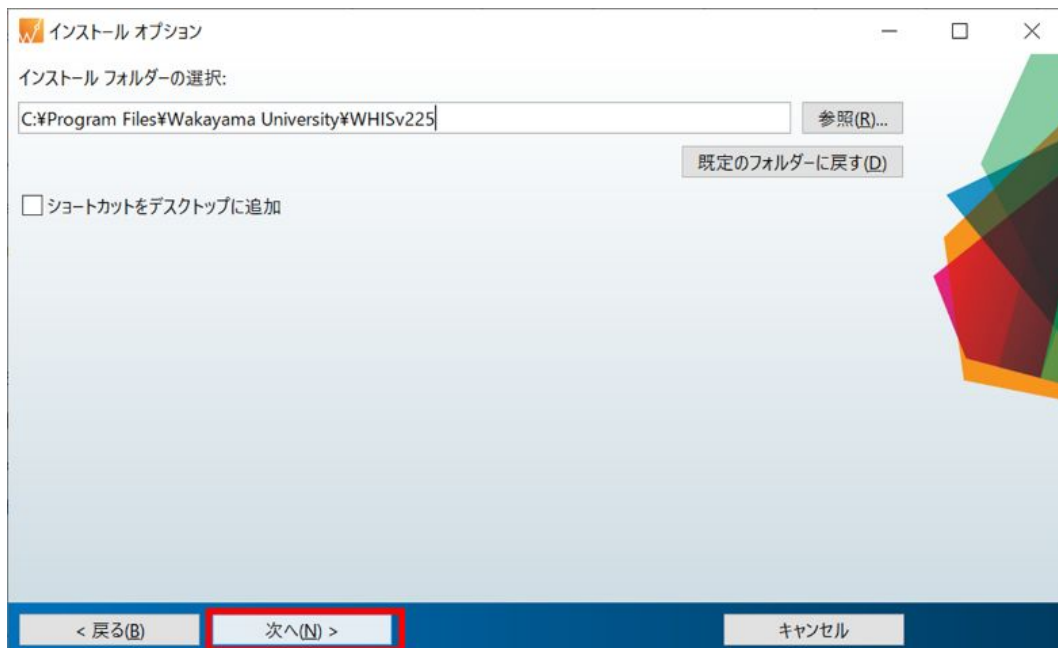


4. アプリケーションを動作させるために必要な"MATLAB Runtime"というプログラムの保存先を選択します。こだわりがなければそのまま[次へ]ボタンを押してください。

4. Select the installation folder of the program called "MATLAB Runtime" required for the application to operate. If you do not have a particular installation folder, just click the [Next] button.

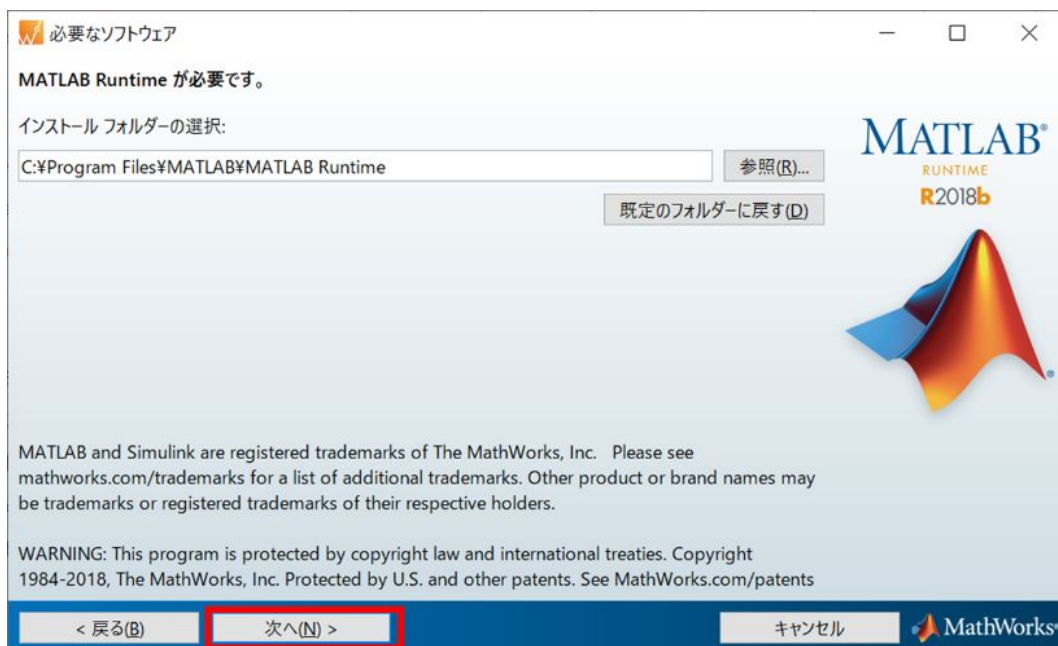


5. ライセンス許諾の条件に同意しますか？ という質問に対して[はい(Y)]を選択します。その後、[次へ]ボタンを押します。

5. Select [Yes (Y)] for the question of the license agreement. Then press the Next button.

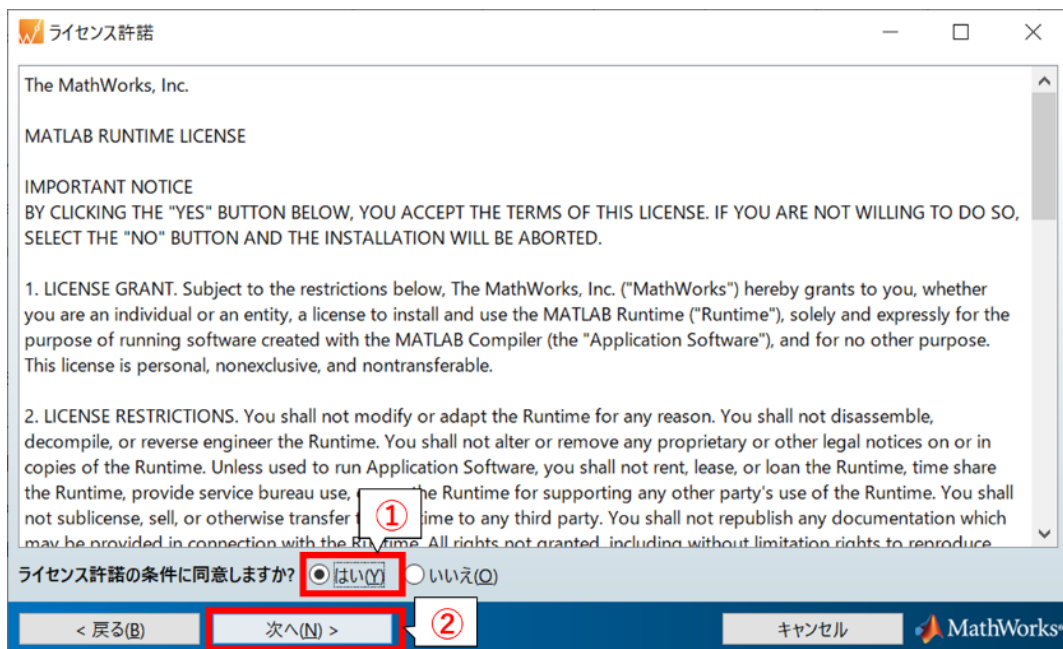


6.[インストール(N)]を選択します。

6. Select [Install (N)].

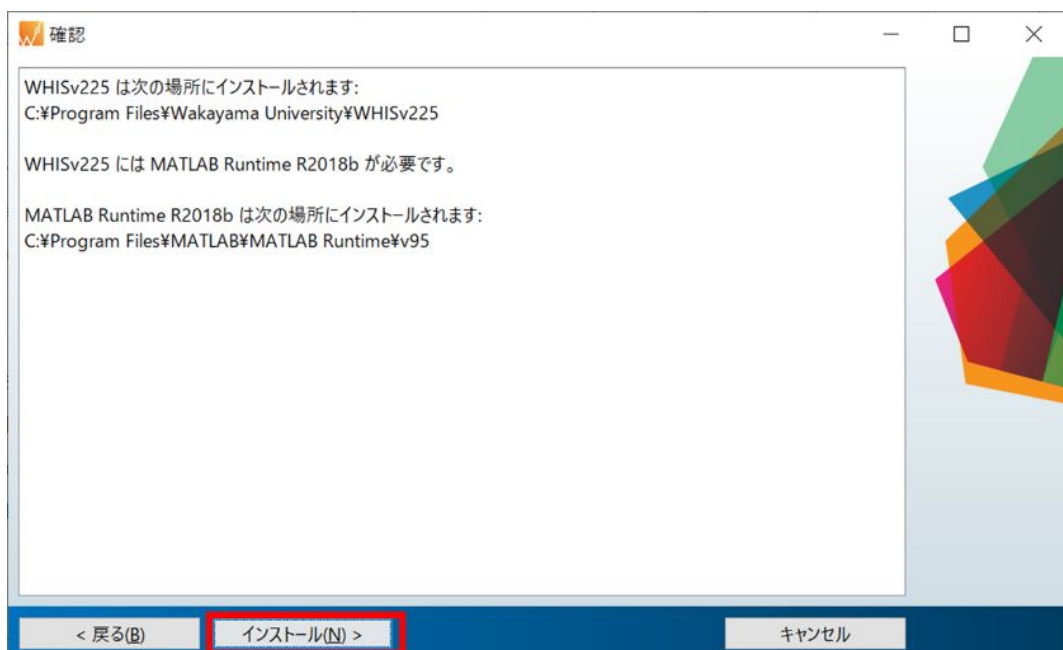

7.インストールが無事に終了すると下のような画面が表示されるので、[終了(N)]ボタンを押してください。

7. When installation is successfully completed, the following screen is displayed. Click the [Exit (N)] button.

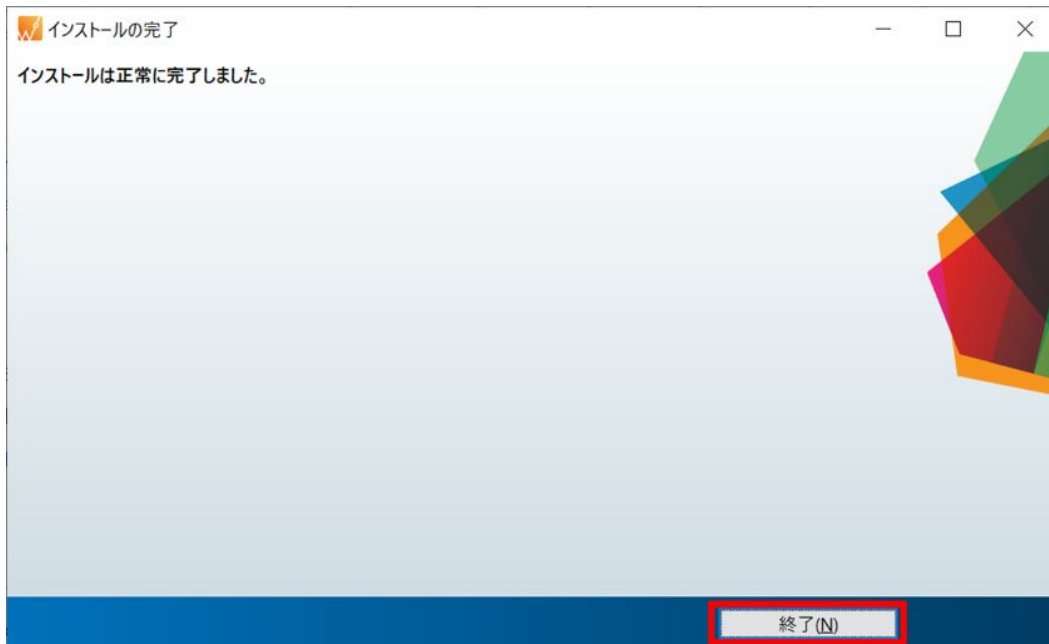

8. WHISv225のインストール先であるフォルダを開きます。


標準では[C:\Program Files\Wakayama University\WHISv225]がインストール先です。[application]ファイルを開きます

8. Open the folder where WHISv225 is installed. By default, [C:\Program Files\Wakayama University\WHISv225] is the installation destination. Open the application folder in it.



9. [WHISv225.exe]をダブルクリックすると模擬難聴システムが起動します。このとき、サウンド入力・出力用のデバイスが正しく接続されていることを確認したうえで、アプリケーションを起動するようにしてください。

9. Double click [WHISv225.exe] to start the Hearing Impairment simulation system. Before starting the application, make sure that the sound device for input and output is connected correctly.

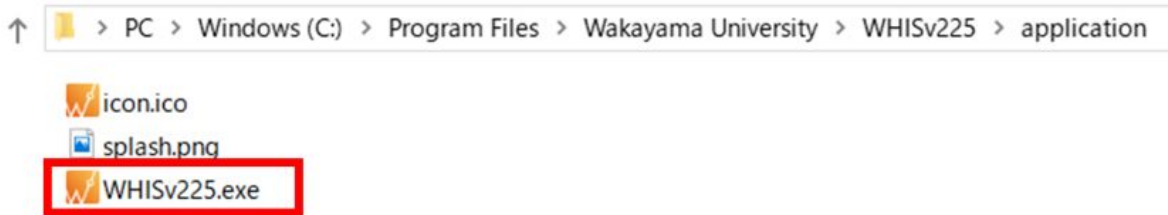

10. 下のようなアプリケーションが起動すれば、無事にセットアップ終了です。

10. If the application below starts up, setup is complete.

